

bellezaMÉDICA

www.bellezamedica.es

Nº 55

StarWalker® PQQX

The Ultra Performance PICO Laser System

Highest power
Shortest pico pulse
Highest energy.

 **quomedica**
Fotona España
choice perfection

ASP
POWERED

New Revolutionary
Adaptive Structured Pulse
Technology

www.quomedica.com



Dra. Evgeniya Ranneva

Dermatóloga, directiva del equipo médico de Clínica Hera y asesora médica en Skin Tech Pharma Group

RRS® HA Long Lasting: nuevo implante dérmico para tratar el fotoenvejecimiento cutáneo

RRS® HA Long Lasting es un innovador implante dérmico (CE clase III) desarrollado por Skin Tech Pharma Group, con alta capacidad de modelado y buena distribución tisular. Mientras que 1ml de otro similar con ácido hialurónico a menudo no es suficiente para restaurar la armonía facial, el formato de este dispositivo en jeringa precargada de 3ml es más que suficiente para que el profesional consiga una armonía *full face*. Gracias a sus propiedades reológicas únicas, RRS® HA Long Lasting cumple uno de los principales deseos y expectativas de todos los pacientes: un resultado instantáneo.

Se compone de un **ácido hialurónico reticulado (21 mg/3ml), de origen no animal, de muy alto peso molecular estabilizado por un tampón protector, que está compuesto por 15 aminoácidos con propiedades antioxidantes e hidratantes** y que también desempeñan el papel de osmolito, estabilizando el AH. Todo ello, apoya el proceso óptimo de implantación y reduce las manifestaciones de reacciones adversas asociadas con el estrés osmótico en el área de uso. El complejo de aminoácidos tiene como función principal "proteger" el ácido hialurónico y ralentizar, a su vez, su biodegradación.

Para conseguir un resultado impecable y cumplir con todas las expectativas, **se ha desarrollado la técnica de los "puntos multidepósito"** (MDP), basada en el enfoque anatómico del proceso de rejuvenecimiento: corregir la modificación de la estructura esquelética que se produce con el paso de los años y su repercusión en la apariencia facial. Las áreas con una fuerte

predisposición a la reabsorción incluyen el esqueleto de la parte media de la cara, particularmente el maxilar, que comprende: el área piriforme de la nariz, las caras superomedial e inferolateral del borde orbitario y el área anterior a la papada de la mandíbula.

El tratamiento debe adaptarse al rostro de cada paciente, sin embargo, el mapeo de 7 puntos de inyección en bolos de 0,2ml en dermis profunda y con aguja de 30G, es una buena recomendación práctica para tratamientos con RRS® HA Long Lasting. Los primeros 3 puntos deben seguir la dirección natural de la protuberancia cigomática. Otros 2 en los pliegues nasolabiales, 1 punto en la comisura de los labios en líneas de marioneta y, para finalizar, 1 para realzar la línea mandibular.

Al ser una nueva generación de implantes dérmicos de AH reticulado, se adapta fácilmente a pacientes socialmente activos, de 25 a 65 años de ambos sexos, sin limitaciones por fototipos de piel, estaciones del año o clima. La presentación de 3ml permite tratar grandes áreas faciales con poca o ninguna molestia para el paciente. Restaura el volumen e hidrata la piel en profundidad, devolviendo su brillo natural y calidad, ganándose, por ende, un gran reconocimiento por parte de mis colegas médicos y de los pacientes de todo el mundo.

Dra. Evgeniya Ranneva



NEW

RRS[®] HA

Long Lasting

REJUVENECIMIENTO FACIAL 3D
EFECTO DE RELLENO - HIDRATACIÓN
ARMONÍA Y SIMETRÍA FULL FACE EN 1 SOLA SESIÓN
SKINBUILDER

CE 2195 Class III medical device



 SKIN TECH

bdb
médica
Distribuidor Oficial en España

www.bdbmedica.com
comercial@bdbmedica.com



[rrshalonglasting](https://www.instagram.com/rrshalonglasting)
[bdb_medica](https://www.instagram.com/bdb_medica)